

EM-200



Desinfektion-Konzentrat ist geeignet für
starre Gegenstände, Endoskopen, chirurgische Instrumente etc.

Anwendung: 1 % tig - 60 Min , 2 % - 15 Min.
Nach Reinigung mit Wasser abspülen.

Vor Kinder unzugänglich aufbewahren
R-Sätze: R 22 – 36 Xi, Xn, T, N
Enthält: Pentandial, Methanal
Gesundheitsschädlich- Biologisch abbaubar



Disinfection concentrate suitable for
rigid objects such as endoscopes, surgical instruments, etc.

Application: 1 % - 60 minutes, 2 % - 15 minutes
Rinse with water after cleaning.

Keep out of the reach of children
R-Phrases: R 22 – 36 Xi, Xn, T, N
Contains pentandial and methanal
Harmful to health - biodegradable



Concentrée désinfectante convient aux
objets rigides, endoscopes, instruments chirurgicaux etc.

Utilisation: à 1% - 60 min, 2 % - 15 min.
Après le nettoyage, rincer à l'eau.

Conserver hors de portée des enfants
Lignes R: R 22 – 36 Xi, Xn, T, N
Contient: pentandial, méthanal
Dangereux pour la santé – décomposable biologiquement



Desinfectie-concentraat is geschikt voor
stijve voorwerpen, endoskopen, chirurgische instrumenten, enz.

Gebruik: 1 % - 60 min, 2 % - 15 min.
Na het reinigen met water afspoelen.

Voor kinderen ontoegankelijk bewaren
R-zinnen: R 22 - 36 Xi, Xn, T, N
Bevat: pentaandial, methanal
Schadelijk voor de gezondheid - Biologisch afbreekbaar



EMAG AG - Germany
Daimler Str. 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: 0049-6105-406700
Fax: 0049-6105-406750

www.emag-germany.de
info@emag-germany.de